



DESCRIZIONE E DATI TECNICI

<i>Tensione diretta</i>	<i>nominale</i>	90	<i>kV</i>
	<i>massima per test</i>	100	
<i>Tensione inversa</i>	<i>nominale</i>	100	<i>kV</i>
	<i>massima per test</i>	110	
<i>Fuoco (IE C60336:2005)</i>		1,2	<i>mm</i>
<i>Caratteristiche di filamento</i>		2 ÷ 4	<i>V</i>
		2 ÷ 2.8	<i>A</i>
<i>Materiale anodo</i>		tungsten	
<i>Angolo anodico</i>		19	<i>°</i>
<i>Capacità termica anodica</i>		10000	<i>J</i>
<i>Massima dissipazione anodica</i>		110	<i>W</i>
<i>Potenza anodica nominale a 0.1 s (DC)</i>		1890	<i>W</i>
<i>Filtrazione inerente</i>		0.5 mm Al	
<i>Diametro massimo</i>		30	<i>mm</i>
<i>Lunghezza totale</i>		91	<i>mm</i>


AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

Devono essere adottate le dovute cautele durante la manipolazione dell'insero per evitare possibili rotture del bulbo di vetro e la conseguente proiezione di frammenti; utilizzare guanti e occhiali di protezione.


Il tubo correttamente alimentato è una sorgente di radiazioni: assicurarsi di prendere tutte le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie.

- Lavare accuratamente la superficie esterna del tubo con alcool, facendo attenzione a potenziali punti di innesco d'incendio. Evitare il contatto del tubo pulito con materiali e/o sostanze che lo possano sporcare.
- Il sistema di fissaggio all'interno del monoblocco deve essere tale da non sottoporre il tubo a sollecitazioni di tipo meccanico.
- Dopo l'installazione, controllare il corretto funzionamento del tubo; in particolare, non vi devono essere fluttuazioni nella corrente anodica o scariche.
- Rispettare i parametri termici del tubo, per mezzo di una adeguata pianificazione e programmazione dei parametri di esposizione e delle relative pause di raffreddamento. Il monoblocco deve essere munito di adeguata protezione termica.
- Le tensioni indicate nei diagrammi sono valide per trasformatori provvisti di centro terra.
- I tubi contengono materiali che possono essere dannosi per l'ambiente, in particolare i tubi con camicia di piombo. Rivolgersi pertanto per lo smaltimento a operatori specializzati che operino in conformità alla Legislazione locale vigente.


DIMENSIONI

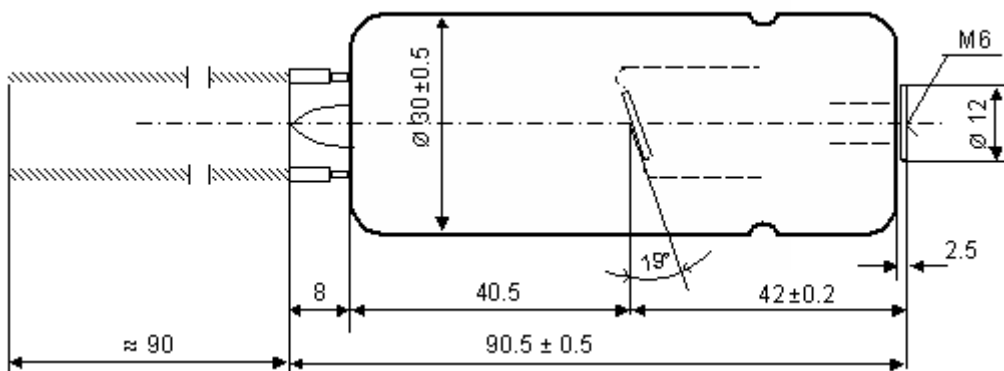


CURVE TERMICHE

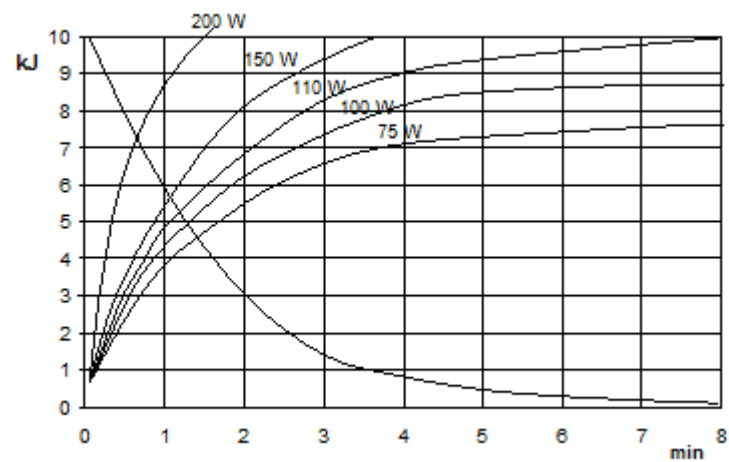



CARATTERISTICHE DI EMISSIONE

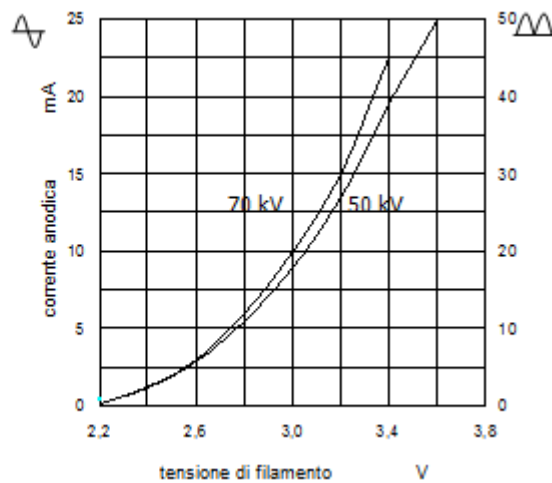


CARATTERISTICHE DI FILAMENTO

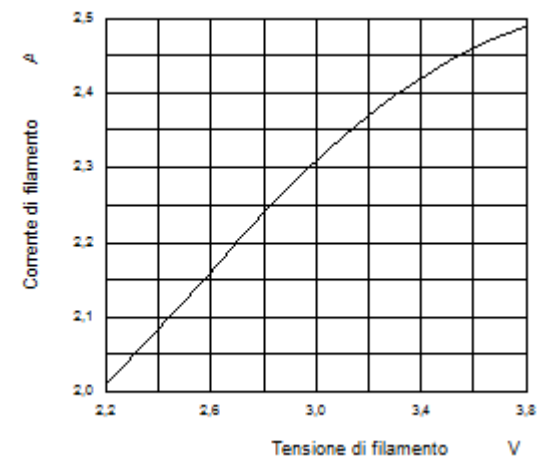

DIAGRAMMI DI CARICO

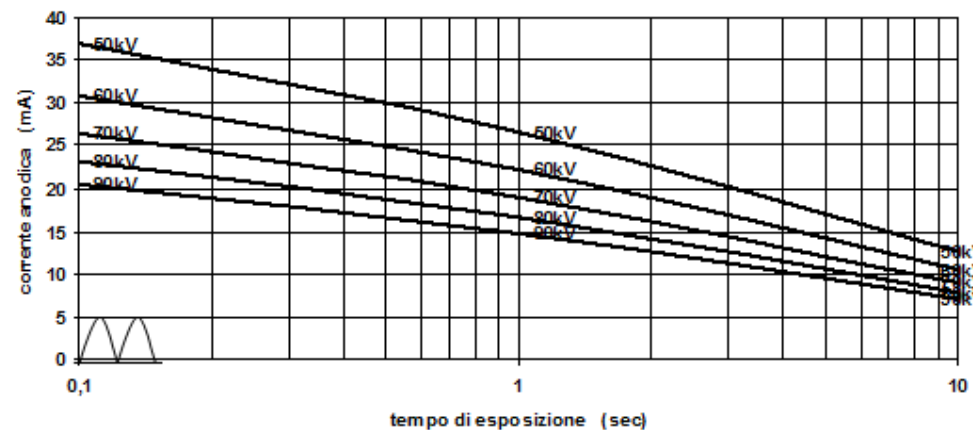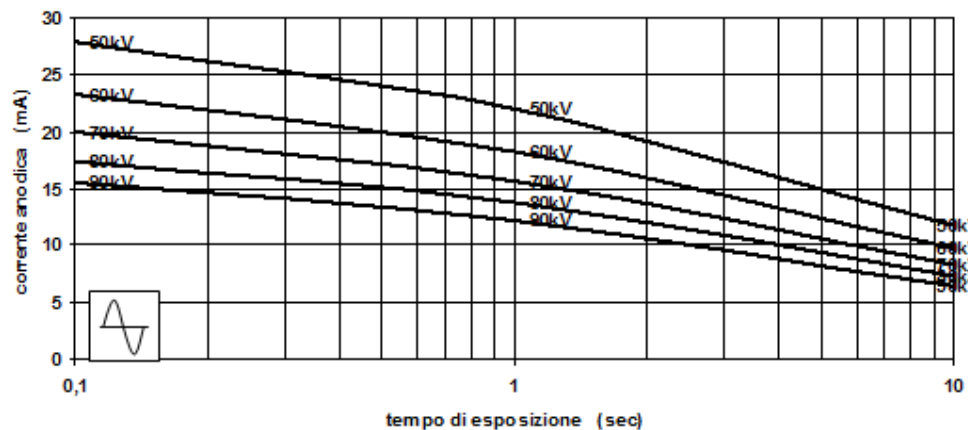

DIAGRAMMI DI CARICO IN CONTINUA

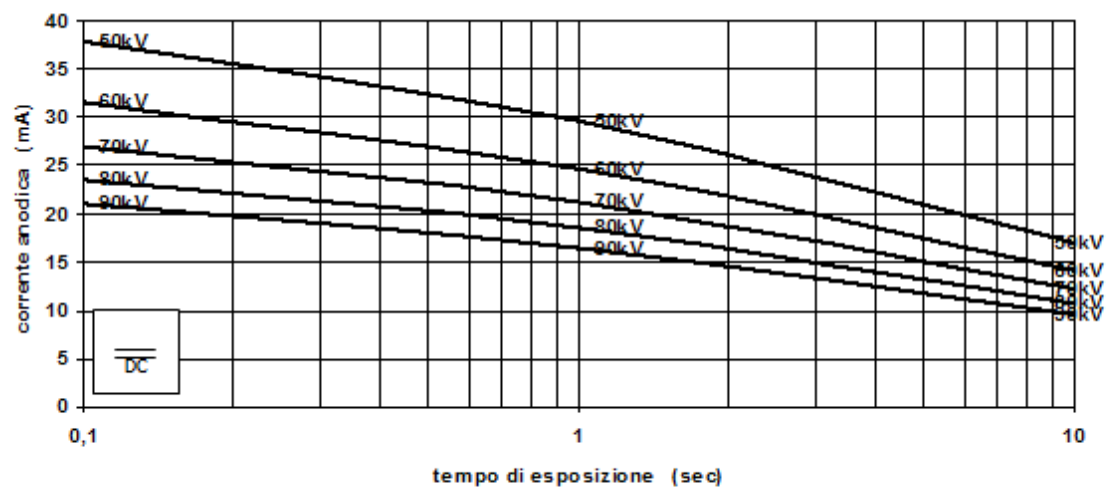

CARATTERISTICHE DI EMISSIONE IN CONTINUA

